



LIV® CONOXIA®. Linde Integrated Valve. Medicinale zuurstof cilinders met geïntegreerde ontspanner.

Veilig en efficiënt

Toediening van zuurstof via de geïntegreerde ontspanner is eenvoudig en garandeert een optimale veiligheid voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Er hoeven geen ontspanners gewisseld te worden en er is geen kans op lekkage. De geïntegreerde ontspanner zorgt voor een constante lage werkdruk en de vereiste flow voor de behandeling. De flow kan snel en nauwkeurig worden ingesteld om aan de specifieke behoefte van de patiënt te voldoen.

Eenvoudig

Zorgverleners sluiten de zuurstofslang aan op de slangtule of sluiten een toedieningssysteem aan op de snelkoppeling (Quick Connector), openen de afsluiter en de behandeling kan beginnen. Daarnaast is het een lichtgewicht cilinder die gemakkelijk te tillen of te transporteren is.

Kostenbesparend

Als zorginstelling heeft u geen aparte ontspanners meer nodig. Onderhoud hoeft niet meer uitgevoerd te worden door de zorginstelling en u bent niet verantwoordelijk voor een defecte regelaar.



- 1 Ergonomisch ontwerp: De LIV heeft een geïntegreerde bedhanger en praktische handgreep om de fles in alle veiligheid op te tillen en te dragen. De gehele ontspanner wordt beschermd door de witte beschermkap. MRI compatibel bij MRI systemen $\leq 3.0T$, met uitzondering van stalen cilinders. Indien het een stalen cilinder betreft, is dat onder andere op de cilinder met een sticker aangegeven.
- 2 De afsluiter is eenvoudig open en dicht te draaien.
- 3 Duidelijke afleesbare geïntegreerde actieve manometer.
- 4 Lichte aluminium cilinder voorzien van productlabel met belangrijke productinformatie.
- 5 Slangtule met continue flow. Flowpositie kan snel en nauwkeurig ingesteld en aangepast worden aan de specifieke behoefte van de patiënt met een flowbereik tot 25 liter/min. Er is keuze uit 12 flowinstellingen.
- 6 Snelkoppeling: DIN of AFNOR snelkoppeling om aan te sluiten op een toedieningssysteem welke eenvoudig vast te klikken is.



Specificaties LIV® CONOXIA®

Cilindertypes	2 liter	5 liter	10 liter	20 liter
Artikelcode	2020166	2020178	2020184	2020189
	2020114	2020179	2020139	
	2020115	2020128	2020140	
Nominale inhoud (gasliter)	400	1100	2200	4400
Volume (m³)	0,4	1,1	2,2	4,4
Cilinderdruk (bar)	200	200	200	200
Uitgangsdruk (bar)	4,5	4,5	4,5	4,5
Diameter X Lengte (mm) met afsluiter	102x510	140x620	140x975	207x940
	102x510	140x680	140x1125	
	102x550	140x620	140x975	
Nominaal gewicht vol (kg)	4,0	11,0	18,0	35,0
	5,0	11,0	19,0	
	5,0	12,0	19,0	
Snelkoppeling	AFNOR	AFNOR	AFNOR	AFNOR
	DIN	AFNOR	DIN	
	DIN	DIN	DIN	
Flowbereik via slangtule	tot 25 L/min	tot 25 L/min	tot 25 L/min	tot 25 L/min
Flowinstelling	0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 25 L/min	0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 25 L/min	0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 25 L/min	0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 25 L/min
Cilinderafsluitingbediening	Handwiel	Handwiel	Handwiel	Handwiel
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Staal Aluminium Staal	Staal

* Voor de afmetingen geldt een tolerantiemarge van +/- 5%.

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland

Tel. +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875

info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen, België

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828

info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be